

ŁATWOŚLIZGI

- MEDINN - produkty do łatwego przemieszczania pacjentów

Informacje podstawowe

Produkty MEDINN to tzw. **łatwoślizgi**, które służą do łatwego przemieszczania pacjentów. Są przydatne nie tylko personelowi, ułatwiając mu w znaczny sposób pracę z obłożnie chorymi, ale chronią pacjenta przed urazami powstającymi w trakcie przenoszenia. Poprzez odpowiednie techniki przemieszczania, stosując jak najmniejsze użycie siły, osiągamy efekt, bez ryzyka urazu u personelu i pacjenta.



Wszystkie produkty, jako wyroby medyczne, objęte są 8% stawką VAT i posiadają certyfikaty CE.

1. SLINN-01 – Podkład ślizgowy pod prześcieradło, do przesuwania i obracania ciężkich i bezwładnych pacjentów.




Materiał, z którego wykonany jest podkład charakteryzuje duża śliskość po stronie wewnętrznej i przyczepność po stronie zewnętrznej. Podkład umożliwia rotację pacjenta z pozycji leżenia na plecach do pozycji leżenia na brzuchu (lub odwrotnie) eliminując bezpośredni dotyk. Skóra chorego nie jest poddawana żadnemu rozciąganiu ani miejscowemu działaniu nadmiernych sił.



2. Rol-INN – Urządzenie rolkowe wspomagające transport pacjentów

Zaprojektowane w celu ułatwienia przeniesienia pacjenta między dwoma bliskimi powierzchniami, np. do i z łóżka, noszy, wanny, stołu operacyjnego.

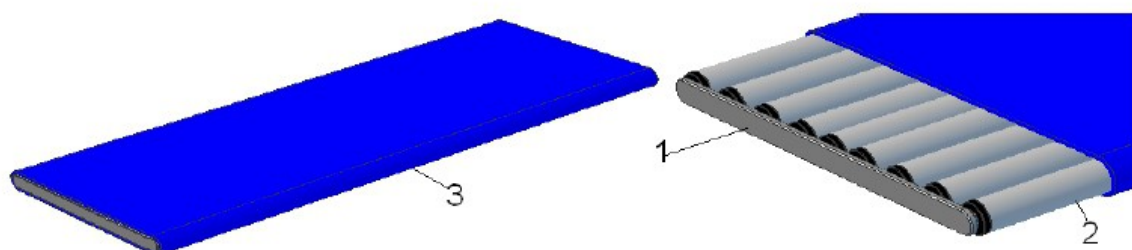

Urządzenie rolkowe przeznaczone jest do przemieszczania pacjenta z jednego łóżka na drugie, bez konieczności podnoszenia pacjenta. Ciało chorego nie jest narażone na żadne uszkodzenia związane z przenoszeniem lub przeciąganiem. Osoba transportująca pacjenta może w sposób komfortowy wykonać swoją pracę.

PANELE ŚLIZGOWE

Panele ślizgowe przeznaczone są dla personelu pielęgniarskiego, terapeutów i opiekunów, umożliwiają przenoszenie unieruchomionych pacjentów do i z łóżka, wózka inwalidzkiego, krzesła, fotela, siedzenia samochodowego, toalety, itp. Nosze tego typu ułatwiają przenoszenie pacjentów i zmniejszają wysiłek fizyczny pracownika wymagany do podtrzymywania pacjenta, sprawiając przy tym, że czynność staje się szybka, wygodna i bezpieczna.

Wykonane zostały ze sprasowanego polietylenu, są odporne na promieniowanie UV.

1. MS 6400 MEDINN – Panel ślizgowy prosty 60x33 cm

Lekki panel, wyposażony w ergonomiczne, ułatwiające transport uchwyty przy krótszych bokach.



2. MS 6410 MEDINN – Panel ślizgowy wyżłobiony 75x33 cm

Panel o większych wymiarach oraz dodatkowo wyposażony w 2 antypoślizgowe pasy zabezpieczające




3. MS 6420 MEDINN – Panel ślizgowy podłużny (nosze, 2 uchwyty)

wymiary: 150x65x0,5 cm

MS 6430 MEDINN – Panel ślizgowy podłużny (nosze, 6 uchwytów)

wymiary: 170x50x0,5 cm


Panele wyposażone w ergonomiczne ułatwiające transport uchwyty przy dłuższych bokach.

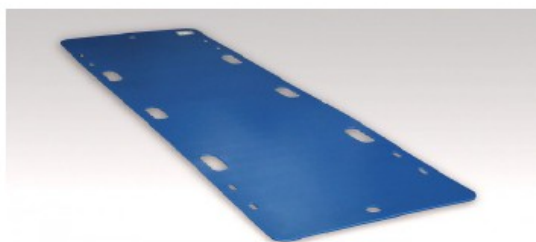

4. MS 6440 MEDINN – Panel ślizgowy eliptyczny

Wymiary: 85x38 cm

Panel o owalnym kształcie giętki i elastyczny.

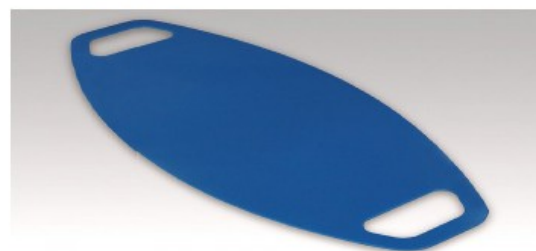

5. MS 6450 MEDINN – Panel ślizgowy zagięty

Panel zagięty z jednej strony pod kątem 90° w celu ułatwienia i zwiększenia bezpieczeństwa transportu pacjenta.



6. SKAR 50200 Panel ślizgowy do przemieszczania (0,5 x 60 x 33 cm); SKAR 50500 Panel ślizgowy do przemieszczania (0,5 x 75 x 33 cm);



Panel dwukrotnie łamany z dolną powierzchnią pokrytą taśmą antypoślizgową.

MATERACE ŚLIZGOWE

Materace wykonane są ze zszytych w formie rękawa specjalnych materiałów. Strona wewnętrzna wykonana jest z super-śliskiej tkaniny o niskim współczynniku tarcia. Strona zewnętrzna – gładka tkanina. Służą do przenoszenia, przewracania, obracania lub zmiany pozycji pacjentów.

Zaprojektowane głównie dla użytkowników, którzy potrzebują pomocy przy przemieszczaniu i zmianie pozycji, a także ułatwiają pracę opiekuna, pozwalając uniknąć ryzyka związanego z nadmiernym obciążeniem.

1. MS 6300 MEDINN – Materac krótki 25x60 cm MS 6310 MEDINN – Materac krótki 50x60 cm

Materace krótkie pozwalają na obracanie lub zmianę pozycji pacjenta samodzielnie lub z pomocą opiekuna. Sprawdzają się przy przenoszeniu z lub na łóżko, wózek inwalidzki, krzesło, fotel oraz WC.



2. MS 6340 MEDINN – Materac do przemieszczania pacjentów 190x60 cm



Długi materac stosowany jest do przemieszczania/ przenoszenia pacjenta z łóżka do łóżka, na nosze, itp.
Dzięki możliwości ułożenia na nim całego pacjenta pozwala na łatwe i szybkie przemieszczanie.

- 3. MS 6325 MEDINN – Materac do przemieszczania pacjentów wymiary: 100x85 cm
- MS 6335 MEDINN – Materac do przemieszczania pacjentów wymiary: 140x85 cm
- MS 6345 MEDINN – Materac do przemieszczania pacjentów wymiary: 190x85 cm

Materace, na których pacjent może przebywać przez dłuższy czas bez ryzyka powstania odleżyn.
Przydatny dla osób opiekujących się głównie przy zmianie pozycji pacjenta i obracaniu.



4. SKAR 10300 – Miękki rękaw ślizgowy 190x60 cm z pokrowcem nylonowym



Materac wykonany z bawełny (str. zewn.) i gładkiego nylonu (str. wewn.) oraz wypełniony samo-układającym się włóknem poliestrowym.

- 5. SKAR 12300 – Miękki rękaw ślizgowy 100x70 cm z pokrowcem nylonowym
- SKAR 20300 – Miękki rękaw ślizgowy 50x60 cm z pokrowcem nylonowym



Rękawy wykonane z bawełny (str. zewn.) i gładkiego nylonu (str. wewn.) oraz wypełniony samo-układającym się włóknem poliestrowym.

MATERACE ŚLIZGOWE JEDNOKIERUNKOWE

Stosowane są do szybkiego i łatwego ułożenia pacjenta, a także do utrzymywania go w prawidłowej pozycji. Wykonane są ze specjalnego materiału, który zapobiega zsuwaniu się, dzięki czemu przeciwdziałają ześlizgiwaniu się siedzącej osoby ze stołków i wózków inwalidzkich. Wykonany z bardzo śliskiej tkaniny po stronie wewnętrznej i gładkiej na zewnątrz.

1. MS 6360 MEDINN – Podkład ślizgowy wymiary 50x45 cm

Podkład ślizgowy jednokierunkowy zszyty w kształcie rękawa o niewielkich wymiarach dla ułatwienia zmiany pozycji.



2. MS 6370 MEDINN – Podkład ślizgowy z uchwytami wymiary 130x45 cm



Podkład zaopatrzony w uchwyty ułatwiające pozycjonowanie pacjenta, stosowany na siedzeniach wózków inwalidzkich, krzeseł, itp.

3. SKAR 20700 – Podkład ślizgowy wymiary 50x45 cm

Podkład wykonany z miękkiego puszystego materiału w kształcie rękawa.



4. SKAR 20760 – Podkład ślizgowy z uchwytami wymiary 130x45 cm



Podkład wykonany z miękkiego puszystego materiału z uchwytami.

PLYTY ŚLIZGOWE

Wyposażone są w pokrowce nylonowe, które dzięki śliskiej powłoce umożliwiają łatwe przesuwanie Pacjentów. Stosuje się je przy przemieszczaniu z łóżka, wózka inwalidzkiego, krzesła, fotela, siedzenia samochodowego, toalety, itp. Nosze tego typu ułatwiają przenoszenie pacjentów i zmniejszają potrzebny do podtrzymywania pacjenta wysiłek fizyczny osoby opiekującej się, sprawiając przy tym, że czynności te stają się szybkie, wygodne i bezpieczne.

Dopuszczalne obciążenie: 120 kg.

Różnica poziomów < 20 cm

Odległość między powierzchniami < 20 cm.

1. MS 6200 MEDINN – Płyta ślizgowa łamana wymiary 180x50 cm z pokrowcem nylonowym

Płyta ślizgowa składana zaopatrzona w pokrowiec nylonowy umożliwiający przemieszczanie pacjenta.



2. MS 6220 MEDINN – Płyta ślizgowa krótka wymiary: 90x50 cm z pokrowcem nylonowym



Płyta ślizgowa o niewielkich wymiarach z pokrowcem w kształcie rękawa.

3. SKAR 91450 – Płyta ślizgowa łamana wymiary: 175x50 cm z pokrowcem nylonowym

Twardy materac służący do przemieszczania z łóżka na łóżko lub na stół operacyjny.



4. FLINN 010 – Płyta ślizgowa łamana Wymiary: 170 x 50 cm



Płyta o maksymalnym obciążeniu 200 kg.

PASY DO PRZENOSZENIA

Stosowane są w terapii i opiece nad pacjentem. Są pomocne w codziennych czynnościach, takich jak wstawanie, siadanie, zmiana pozycji, itd. personelu medycznego, a także podczas opieki nad chorym w domu.

Materiał i szycia są wytrzymałe, gwarantują bezpieczne, efektywne i długie użytkowanie.

Dzięki zastosowaniu mini noszy opiekun/terapeuta może skutecznie uniknąć nadmiernego wysiłku.

Pasy ułatwiają zmianę pozycji pacjenta, są pomocne przy wstawaniu, siadaniu, stanowią doskonałe zabezpieczenie pacjenta w czasie ćwiczeń, mobilizacji, przenoszenia z łóżka na wózek, itp.

1. MS 6500 MEDINN – Pas do przenoszenia wymiary: 87x16 cm

Małe nosze rozszerzające/ wydłużające ramiona opiekuna.



2. MS 6505 MEDINN – Pas do przenoszenia wymiary: 50x20 cm MS 6506 MEDINN – Pas do przenoszenia wymiary: 60x20 cm



Małe nosze rozszerzające/ wydłużające ramiona opiekuna-
elastyczne.

3. MS 6511 MEDINN – Pas do podtrzymywania S rozmiar: 60-90 cm MS 6512 MEDINN – Pas do podtrzymywania M rozmiar: 78-152 cm MS 6513 MEDINN – Pas do podtrzymywania L rozmiar: 84-162 cm



Pasy wyposażone w uchwyty, które pozwalają na uchwycenie pacjenta bez dotykania jego ciała.

4. MobeLTINN Pas do podtrzymywania

Dostępne rozmiary: **S rozmiar:** 55-95 cm, 7 uchwytów
M rozmiar: 65-115 cm, 9 uchwytów
L rozmiar: 95-155 cm, 11 uchwytów
XL rozmiar: 110-170 cm, 13 uchwytów



Mocny i solidny pas wyposażony w uchwyty do trzymania pacjenta bez dotykania jego ciała.
Max. waga pacjenta: 200 kg

5. MS 6520 MEDINN – Pas do podtrzymywania

Pas służący do głównie do podtrzymywania nóg.



6. SKAR 60240 – Pas do przenoszenia z uchwytami wymiar 70-120 cm



Pas wyposażony w 9 uchwytów i bezpieczne zapięcie.

7. SKAR 30120 – Małe nosze (pas) wymiary: 20x60 cm

SKAR 30300- Małe nosze (pas, welur) wymiary: 20x60 cm

SKAR 30120- nosze z nylonu dla środowisk o wyższych wymogach higieny.

SKAR 30300- nosze z miłego w dotyku weluru



PRZEŚCIERADŁA (NOSZE)

Prześcieradła (nosze) wykonane są ze śliskiego nylonu (za wyjątkiem MS 6145 MEDINN) z uchwyty dla osób przenoszących. Prześcieradła ślizgowe są trwałe i wytrzymują nawet duże obciążenia, dzięki czemu mogą być stosowane na oddziałach bariatrycznych do przenoszenia ciężkich pacjentów.

1. MS 6140 MEDINN – Prześcieradło ślizgowe z 6 uchwytami


wymiary: 200x90 cm 6 uchwytów



Prześcieradło z 6 uchwytami, dzięki którym przenoszenie pacjentów jest łatwe i proste przez rozłożenie ciężaru pacjenta na 6 osób personelu.

2. MS 6142 MEDINN – Prześcieradło ślizgowe z 8 uchwytami

wymiary: 200x90 cm 8 uchwytów

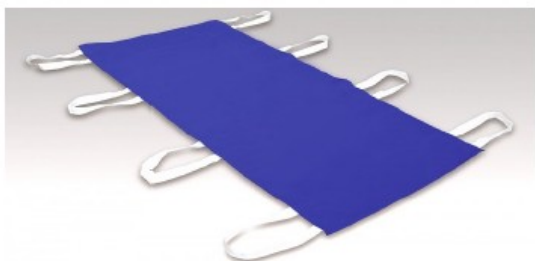

Prześcieradło z 8 uchwytami, łatwiejsze i bezpieczniejsze przenoszenie dzięki rozłożeniu ciężaru pacjenta na 8 osób.

3. MS 6145 MEDINN – Prześcieradło do noszy z 6 uchwytami (Non-sliding)

wymiary: 200x100 cm

Wytrzymałe prześcieradło z materiału bez właściwości ślizgowych. Przeznaczone głównie do przenoszenia z łóżka na nosze.



4. SKAR 40120 – Fleksynosze wymiary: 112x53 cm



Nosze z dwuwarstwowym wkładem wyposażone z 4 uchwytami.

5. SKAR 40160 – Fleksinosze wymiary: 152x53 cm



Nosze wyposażone w 6 uchwytów, solidne i bezpieczne.

PLATFORMY OBROTOWE

Dzięki platformom obrotowym na podłogę można łatwo przyśpieszyć przenoszenie pacjenta oraz zmniejszyć ryzyko obrażeń opiekuna, będących konsekwencją używania nadmiernej siły.

1. MS 6550 MEDINN – Platforma obrotowa

średnica: 38 cm

grubość: 15 mm

waga: 1,7 kg



Platforma o antypoślizgowej powierzchni z obu stron, dzięki której można kontrolować obrót.

2. MS 6555 MEDINN – Platforma obrotowa poduszka

średnica: 40 cm

grubość: 20 mm

waga: 0,4 kg

Platforma składająca się on z dwóch elastycznych płyt o niskim współczynniku tarcia obracających się wokół osi środkowej.



3. SKAR 50850 Platforma obrotowa

średnica: 38 cm



Platforma wykonana z materiału nieślizgającego się po obydwu stronach.

LEJCE DO PODCIĄGANIA

Lejce- drabinki pomagają przy samodzielnym siadaniu pacjenta w łóżku.

1. MS 6540 MEDINN Lejce-drabinka

wymiary: 200x20 cm

6 oddzielnych uchwytów



2. DL Drabinka-lejce z tworzywa

wymiary: 170x29 cm

5 szczebelków z tworzywa



3. DLD Drabinka- lejce drewniane

wymiary: 250x30 cm

6 drewnianych szczebelków



Łatwiej leczyć, łatwiej żyć



Biuro handlowe:
40-763 Katowice, ul. Ustrońska 8
POLAND
tel./fax +48 32 252 67 56
salon@innow.pl

INNOW jest producentem sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Misją firmy jest wspomaganie osób leczonych jak i tych, którzy leczą; niepełnosprawnych jak i tych którzy pielęgnują.

Celem prowadzonej działalności jest służyć ludziom wiedzą i doświadczeniem w projektowaniu, produkcji, doradztwie, sprzedaży i adaptacji urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych, aby umożliwić klientom spełnienie ich potrzeb i oczekiwań. W ciągłym rozwoju oferty ujawnia się innowacyjność firmy, podążającej niezmiennie za pojawiającymi się nowymi potrzebami klientów.

Chcąc zapewnić klientom usługi o potwierdzonej wysokiej jakości, a także spełniając potrzeby w zakresie organizacji i zarządzania, INNOW wdrożyło, stosuje i rozwija system zarządzania jakością wg normy ISO 9001. System, certyfikowany przez TÜV NORD obejmuje swym zakresem: doradztwo, projektowanie, produkcja, sprzedaż i przystosowanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

Produkcja INNOW obejmuje działy:

1. Wyposażenia jednostek służby zdrowia i gabinetów lekarskich
– w tym meble medyczne: kozetki, stoły i fotele zabiegowe, transportowe, parawany, etc.
2. Urządzenia i pomoce rehabilitacyjne
– w tym: stoły rehabilitacyjne, do masażu, fotele rehabilitacyjne, etc.
3. Wyposażenie do kąpeli pacjentów
– w tym: wózki kąpielowe, krzesła i siodełka prysznicowe, oporęczowanie WC i łazienek, etc.



Salon firmowy:
40-763 Katowice, ul. Ustrońska 8
POLAND
tel. +48 32 252 67 56
salon@innow.pl



www.innow.pl