



Oxivir

Nowa generacja dezynfektantów

Preparat **Oxivir** jest skoncentrowanym preparatem na bazie aktywnego tlenu o uniwersalnym zastosowaniu, przeznaczonym do mycia i dezynfekcji wszystkich wodoodpornych powierzchni i przedmiotów w służbie zdrowia.

Działanie

Preparat Oxivir wykazuje doskonałe właściwości myjące będąc jednocześnie wyjątkowo skutecznym środkiem biobójczym w stosunku do szerokiego spektrum mikroorganizmów z rodzaju bakterii (łącznie z Tbc), grzybów i wirusów (adeno, polio) oraz sporów, a zatem umożliwia przeprowadzenie procesu mycia i dezynfekcji „w jednym kroku”. Jego działanie oparte jest na innowacyjnej technologii nadtlenku wodoru AHP (Accelerated Hydrogen Peroxide). AHP to synergiczne połączenie powszechnie stosowanych, bezpiecznych składników, które w połączeniu z niskim poziomem nadtlenku wodoru osiągają wyjątkową skuteczność dezynfekcyjną i myjącą.

Oxivir jest preparatem bezpiecznym w użytkowaniu, doskonale sprawdza się na wszelkich wodoodpornych powierzchniach i w obszarach wysokiego ryzyka. Doskonale nadaje się do usuwania organicznych zanieczyszczeń jak krew, wydzieliny i wydaliny. W krótkim czasie rozpuszcza zabrudzenia, jednocześnie je dezynfekuje, a dzięki bardzo dobrym właściwościom myjącym pozostawia powierzchnie czyste. Substancja aktywna użyta w nim nie powoduje narastania odporności szczepów bakterii.

Zastosowanie

Oxivir jest uniwersalnym i ekonomicznym preparatem do dezynfekcji i czyszczenia wszelkich powierzchni wodoodpornych oraz sprzętów, w tym wykonanych z wrażliwych na alkohol materiałów jak np. szkło, guma czy tworzywa sztuczne. Powierzchnie takie jak podłogi, ściany, meble oraz sprzęt medyczny stanowiący wyposażenie sal, inkubatory, wózki szpitalne, wyposażenie łazienek, wanny, brodziki, nocniki, plastikowe pojemniki należy zmywać roztworem w zależności od stopnia zanieczyszczenia.



Cechy

- skuteczne mycie i dezynfekcja w jednym;
- nie zawiera aldehydów, chloru, alkoholu, pochodnych guanidyny;
- bezpieczny dla użytkownika jak i mytych, dezynfekowanych powierzchni i przedmiotów;
- wysoce skuteczny w warunkach brudnych i czystych;
- skuteczność potwierdzona według europejskich norm;
- przebadany na ponad 30 mikroorganizmach chrobotwórczych;
- możliwość stosowania w obecności pacjentów;
- posiada bardzo dobre właściwości odkamieniające i zapobiega jego osadzaniu;
- nie pozostawia smug na powierzchniach;
- przyjazny dla środowiska - produkt rozpadu to tlen i woda;
- wysoka kompatybilność materiałowa.



Diversey
for a cleaner, healthier future™

Stężenia użytkowe / czasy oddziaływania

Spektrum działania	Stężenie %	Czas działania
Czyszczenie i dezynfekcja powierzchni i sprzętu w placówkach służby zdrowia	1.5%	15 min.
Czyszczenie i dezynfekcja z podwyższonym obciążeniem biologicznym	3%	5 min.
Bakterie (łącznie z MRSA, Legionella pneumophila, Salmonella choleraesuis / typhimurium)	0,5%	5 min.
Grzyby (candida albicans)	1.5%	15 min.
Adenowirus, Poliowirus	1 %	5 min
Avian influenza virus, Vaccinia virus, Norovirus, Coronavirus Rotavirus, Polyomavirus SV40	0.6%	5 min.
Mycobacterium tuberculosis	20%	15 min.
Spory	15%	30 min.
B, F według metody PZH	2%	5 min.

Oxivir został przebadany pod kątem zgodności z najnowszymi standardami europejskimi. Na Państwa prośbę chętnie udostępnimy opinie.

***UWAGA!** Nie używać ciepłej wody podczas przygotowywania roztworów, mycia, dezynfekcji i płukania. Nie mieszać z innymi preparatami. Nie używać (nie nanosić) na powierzchnie wrażliwe na działanie wody i kwasów!

Przygotowanie roztworu roboczego

Roztwór przygotowywać bezpośrednio przed użyciem. W przypadku ręcznego przygotowania roztworu roboczego odmierzyć odpowiednią ilość substancji zgodnie z tabelą stężeń i dodać do uprzednio odmierzonej objętości wody. Po wymieszaniu roztwór jest gotowy do stosowania. Substancję zawsze dodaje się do uprzednio przygotowanej wody, a nie odwrotnie. Roztwór przygotowywać w rękawicach ochronnych oraz maseczce ochronnej. Do przygotowania roztworów sugeruje się stosowanie urządzeń dozujących, zapewniających uzyskanie wskazanych stężeń.

Sposób użycia

Stosować roztwór roboczy w stężeniu odpowiednim do wybranego czasu ekspozycji. Przedmioty, które można zanurzyć dezynfekować przez zanurzenie, tj. przedmioty powinny być całkowicie przykryte i wypełnione roztworem. Dezynfekowane powierzchnie myć przy pomocy ścierek, mopów lub mechanicznych urządzeń myjących. Po procesie dezynfekcji, jeśli konieczne, spłukać. W przypadku stosowania roztworu z butelki z końcówką spryskującą, nanieść preparat za pomocą spryskiwacza na powierzchnię. Czyścić powierzchnię ściereczką. Następnie, ponownie nanieść za pomocą spryskiwacza preparat na powierzchnię i zostawić ją wilgotną na 5 minut.

Skład chemiczny

natlenek wodoru: 5-15 %; anionowe środki powierzchniowo czynne 5%; niejonowe środki powierzchniowo czynne 5%

Certyfikaty i atesty:

Opakowania handlowe:

Nr katalogowy:

Data ważności:

Pozwolenie Ministra Zdrowia nr 3609/08

kanister 5 kg

G11745

3 lata od daty produkcji (na opakowaniu).

Warunki przechowywania i środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Oxivir znajdują się w karcie charakterystyki preparatu.

UWAGA: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel.



Diversey Polska Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5; 00-446 Warszawa

tel.: 22 328 10 00; fax: 22 328 10 01

dok.poland@diversey.com